



**XLIFE**  
Suitable for all family

**1**  
Stáhněte si aplikaci

iOS: hledejte "XLIFE" v App Store  
Android: hledejte "XLIFE" v Google Play





Naskenujte QR kód pro stažení aplikace



**2** **3**

Otevřete aplikaci  
Klikněte na Xlife

Stikněte a držte tlačítko napájení,  
abyste čistící zapnuli






modré světlo  
bliká

**Připojení k WiFi produktu**

**1** **2**


Připojte se k WiFi produktu "Xlife-X1-XXXXXX" Zpět k aplikaci Bebird Vstupte a začněte používat

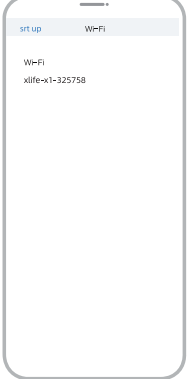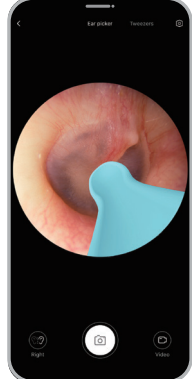**Výměna příslušenství**

Odšroubujte hlavici nástavce pro čištění uší, vytáhněte silikonový nástavec, abyste jej mohli vyměnit. Nový nástavec dobře zasroubujte a zasuňte.


Před použitím zkontrolujte, zda je koncovka pro čištění uší pevně utažená. Koncovka má vlastní závit a pro výměnu ji lze odšroubovat ve směru hodinových ručiček.

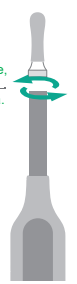


Pro lepší uživatelský zážitek doporučujeme vyměnit koncovku pro čištění uší alespoň každé 3 měsíce (lze upravit podle frekvence používání).

**Příslušenství**


**1** PC koncovka pro čištění uší 2x  
**2** Houbovitá koncovka pro čištění uší 2x  
odstraňování ušního mazu a mastnoty




**3** Prstencová koncovka pro čištění uší 1x  
snadné seškrabávání; vyšší zakřivení




**4** Silikonová koncovka pro čištění uší 6x

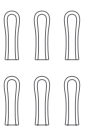

**5** Úložné pouzdro 1x  
pohodlné uložení příslušenství



**6** Nabíjecí kabel 1x  
nabíjecí kabel typu USB-C

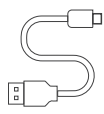

**Řešení problémů**

problém	řešení
Žádná odezva po spuštění	K nabíjení použijte náhodný nabíjecí kabel.
Aplikace se rychle ukončí	Odstraňte stávající aplikaci a naskenováním QR ji znovu nainstalujte.
Pocit ošemetnosti při výměně ušních koncovek	Zarovnejte náhradní ušní koncovku na kameru a utáhněte ji ve směru hodinových ručiček.
Kontrolka bliká	K nabíjení použijte náhodný nabíjecí kabel.
Neobvyklé zobrazení v aplikaci	Přerušte připojení, restartujte výrobek a znovu se připojte.

Pokud máte s výše uvedenými postupy stále problémy, obraťte se pro další pomoc přímo na zástupce našeho zákaznického servisu.


**Nebezpečné substance**

část	nebezpečný materiál					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
součástky tiskárných spojů	×	○	○	○	○	○
pouzdro	○	○	○	○	○	○
plastové, gumové příslušenství	○	○	○	○	○	○

Tento formulář je vytvořen v souladu s normou SJ/T 11364  
○ : představuje poměr nebezpečných materiálů nižší než GB/T26572-2011  
× : představuje poměr nebezpečného materiálu nad GB/T26572-2011

**Technické parametry**

Brand	Xlife
Název produktu	Chytrý vizuální čistící uší
Model	X1+
Úroveň objektivu	Vysoce přesný endoskop
Hloubka ostrosti	10 ~ 50mm
Průměr objektivu	3,5mm
Rychlost přenosu obrazu	20fps
Životnost baterie	45 minut
Doba nabíjení	45 minut
Vstupní proud	5V --- 0.5A
Gyroskop	6 os
Síťový standard	IEEE 802.11b/g
Provozní teplota	-10 ~ 45°C
Hmotnost tyče	13g
Provozní frekvence	2,4GHz
Senzor obrazu	CMOS



**⚠ Upozornění**

- Při čištění čočky opatrně otřete vatovým tamponem.
- Před použitím musí být kryt ušní koncovky správně nasazen a nesmí být uvolněný, aby nespádl.
- Před použitím sledujte okolní prostředí. Nepoužívejte jej v prostředí, které je náchylné k nárazům.
- Dětem zakažte používat tento výrobek samostatně, aby nedošlo k neúmyslnému zranění.
- Nevkládejte zařízení do žádné formy tekutiny.
- Pro efektivní používání je nutné baterii jednou měsíčně nabíjet.
- Při používání se mírně zvýší teplota (z údajů laboratoře bebird vyplývá, že maximální teplota celého zařízení nepřesáhne přibližně 45 °C). Neváhejte prosím s používáním.


**Záruka**

**Informace o uživateli**

Jméno: \_\_\_\_\_ Telefonní číslo: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Prodejce: \_\_\_\_\_ Telefonní číslo: \_\_\_\_\_



**⚠ Poznámka: Nepoužívejte nabíjecí zařízení s výstupním napětím vyšším než 5 V.**